



TERAPIA NON INVASIVA PER LA SALUTE INTIMA FEMMINILE

REVIGEN è una piattaforma multifunzionale al servizio della salute intima femminile che interviene in modo sicuro e confortevole per la maggior parte dei disturbi e delle patologie vulvo-vaginali con terapie alternative e non ablative.

IL CUORE DI REVIGEN

5 APPLICATORI

5 FORME DI ENERGIA

INNUMEREBILI
SOLUZIONI
TERAPEUTICHE

RADIO FREQUENZA
ELETTROPORAZIONE
EMS - ELETTROTHERAPIA
HIFU
PLASMA





ReviGen

INTIMATE REJUVENATION SYSTEM

Una soluzione efficace per i più comuni disturbi **vulvo-vaginali**

UNA SINERGIA DI ENERGIE RIGENERATIVE

La INTIMATE REJUVENATION SYSTEM di ReviGen è una metodica innovativa e indolore che, grazie alle nuove scoperte della bioingegneria, apre nuove prospettive alle patologie vulvo-vaginali.

Le energie di REVIGEN intervengono efficacemente per correggere i disordini dell'estetica e della funzionalità genitale femminile.

MOLTEPLICI ENERGIE COMPLEMENTARI:

RADIOFREQUENZA - ELETTROPORAZIONE
ELETTROTHERAPIA - HIFU - PLASMA

VAGINAL REGENERATION

2 APPLICATORI
4 FORME DI ENERGIA

VULVAR REJUVENATION

3 APPLICATORI
3 FORME DI ENERGIA

Spesso la donna, sia in età fertile che in periodo peri-menopausale, presenta vari sintomi legati ai disturbi intimi.

Con il naturale processo di invecchiamento le pareti vaginali tendono a subire un progressivo deterioramento, diminuiscono gli estrogeni circolanti con modificazione dell'ambiente vaginale-vulvare e conseguenti sintomi, quali:

- IPERLASSITÀ VAGINALE
- SECCHENZA E ATROFIA VAGINALE
- IRRITAZIONE, BRUCIORE E PRURITO INTIMO
- LIEVE INCONTINENZA URINARIA
- DISTURBI DELLA SFERA SESSUALE, DISPAREUNIA
- LIEVE PROLASSO GENITALE
- IPOTONIA DEL PAVIMENTO PELVICO, VAGINISMO
- ATROFIA VULVARE
- LICHEN SCLERO-ATROFICO VULVARE

Sino ad ora le soluzioni a tali disfunzioni erano di natura farmacologica o di pertinenza chirurgica con conseguente invasività delle terapie. Oggi esse possono essere recuperate in modo molto più conservativo con soluzioni che restaurano il comfort e l'aspetto della zona intima, migliorando la qualità della vita delle donne.


VAGINAL REGENERATION

RADIOFREQUENZA, ELETTROPORAZIONE ED EMS-ELETTROTHERAPIA VAGINALE UN UNICO APPLICATORE PER DIVERSE TERAPIE

Progettato per stimolare una risposta rigenerativa dei tessuti, grazie all'azione della radiofrequenza, dell'elettroporazione e dell'elettroterapia.

IL CORPO DELL'ESCLUSIVO MANIPOLO PER IL TRATTAMENTO ENDOVAGINALE

- ERGONOMICO E LEGGERO
- BIOCOMPATIBILE IN ACCIAIO INOX CHIRURGICO, STERILIZZABILE IN AUTOCLAVE
- MASSIMA ECONOMICITÀ: NON NECESSITA DI ESSERE SOSTITUITO NELL'ARCO DEL TEMPO, LA SUA DURATA DI APPLICAZIONE È ASSICURATA PER MIGLIAIA DI TRATTAMENTI
- DOTATO DI 2 ELETTRODI CILINDRICI PER UN INTERVENTO A 360° SU TUTTO LO SPAZIO VAGINALE, POSIZIONATI AD UNA DISTANZA OTTIMALE PER INTERVENIRE SU UN'AMPIA ZONA
- ELETTRODO POLIVALENTE: PERMETTE UNA TRIPLICE EMISSIONE DI RADIOFREQUENZA, ELETTROPORAZIONE ED ELETTROTHERAPIA
- RADIOFREQUENZA IN MODALITÀ MONOPOLARE - BIPOLARE - CAPACITIVA - RESISTIVA
- MASSIMO COMFORT DELLE PAZIENTI, DISEGNATO PER AGIRE DELICATAMENTE SULL'ANATOMIA FEMINILE

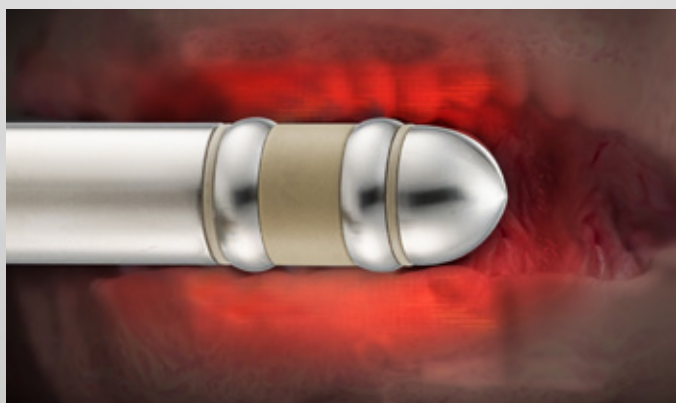

Dopo l'applicazione di una crema o di un gel, il manipolo viene posizionato a livello vaginale e mosso lentamente, senza arrecare fastidio o imbarazzo alla paziente.

Il trattamento è confortevole e sicuro.



LE AZIONI TERAPEUTICHE


RADIOFREQUENZA VAGINALE

RIPRISTINA L'ELASTICITÀ E LA COMPATTEZZA DEI TESSUTI VAGINALI

La radiofrequenza è una corrente ad alta frequenza che sviluppa un calore endogeno, accelera il metabolismo tissutale inducendo un incremento del turn-over cellulare, stimola i fibroblasti a produrre nuovo acido ialuronico, collagene ed elastina.

Revigen dispone di 4 modalità di funzionamento, da modulare secondo le effettive esigenze della paziente: radiofrequenza capacitiva - resistiva - monopolare - bipolare.

La coesistenza di varie modalità di trasmissione in uno stesso elettrodo permette una vasta scelta di protocolli, a seconda delle indicazioni cliniche.

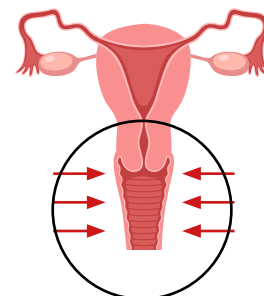

ELETTROPORAZIONE VAGINALE



VEICOLAZIONE TRANSDERMICA DI SOSTANZE ATTIVE PER PATOLOGIE VAGINALI

Trattasi di una veicolazione in grado di garantire la penetrazione dei principi attivi nei tessuti target. L'elettroporazione permette la veicolazione transdermica e transmucosa dei principi attivi necessari al normale ripristino della fisiologia vaginale.

L'utilizzo di particolari impulsi elettrici a determinate frequenze provoca la variazione transitoria della membrana cellulare con conseguente apertura dei canali acquosi (elettropori) e aumenta la capacità penetrativa di sostanze a vario peso molecolare.

In tal modo possono essere veicolati diversi principi attivi e sostanze rigenerative.

La scelta sarà dettata dal sintomo e dalle patologie da trattare: prodotti a base di acido ialuronico, amminoacidi e multivitaminici, antinfiammatori, analgesici, miorilassanti, acido lipoico, etc.

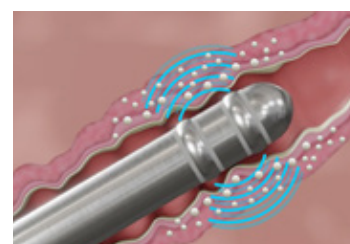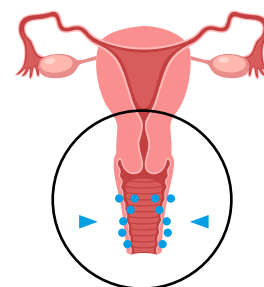

ELETTROSTIMOLAZIONE VAGINALE

LE ONDE CHE TONIFICANO

Le particolari forme di correnti e di frequenze scelte servono alla tonificazione muscolare del pavimento pelvico, con beneficio per la funzionalità vescicale, miglioramento dei problemi di incontinenza e prevenzione del prolasso.



VAGINAL REGENERATION

HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND

L'APPLICATORE HIFU

RASSODA E TONIFICA IL CANALE VAGINALE


FOCALIZZA L'ENERGIA ULTRASONICA
A DELLE PROFONDITÀ
BEN DETERMINATE E INTERVIENE
SUI TESSUTI VAGINALI



CARTUCCIA

DL 3.0

4.0 MHz 3mm

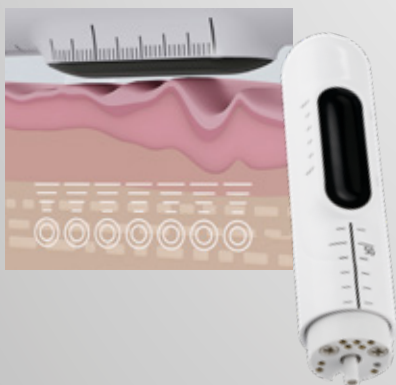

CARTUCCIA


DL 4.5

4.0 MHz 4,5mm






Prima dell'intervento, l'applicatore Hifu viene ricoperto di gel e da una cover.

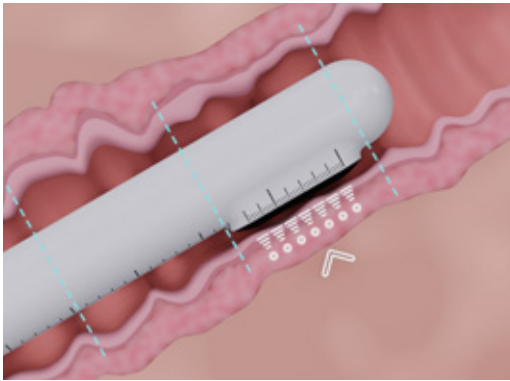

EFFETTO TERMO-RIGENERATIVO

L'applicatore Hifu produce delle linee di rigenerazione composte da punti di energia termica, ad una profondità di 3 o 4,5mm.

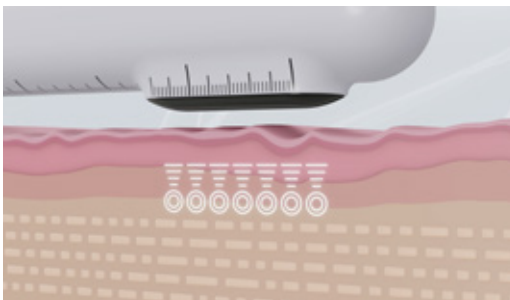

Tramite software, con la rotazione automatica del manipolo vaginale, vengono parametrati gli angoli di rotazione e i numeri di shot.

GLI HIFU CONTRASTANO LA LASSITÀ VAGINALE CON UN EVIDENTE EFFETTO RISTRUTTURANTE

La terapia Hifu è indicata per i processi di rigenerazione dei tessuti che presentano problematiche quali l'atrofismo della mucosa e l'iper rilassamento vaginale.

La tecnica consiste nel rilasciare un fascio di ultrasuoni microfocalizzati, ad alta intensità, con un elevato grado di precisione.

L'energia ad ultrasuoni Hifu è focalizzata su una serie di punti di energia termica della dimensione di circa un decimo di mm, sotto la superficie della mucosa. Tale fascio, focalizzato ad una profondità di 3 o 4,5mm e ad una temperatura di 60-65°C, crea delle micro-coagulazioni che determinano un processo rigenerativo indotto dalla denaturazione tissutale.

Questo processo stimola la rigenerazione della mucosa vaginale, un recupero intenso e progressivo della tonicità dei tessuti ed una riduzione del diametro del canale vaginale.

- Processo rigenerativo indotto dalla denaturazione tissutale
- Ispezzimento della mucosa
- Riduzione del diametro del canale vaginale
- Prevenzione del lieve prolasso vaginale e dell'incontinenza urinaria

HIFU SYSTEM 

GLI EFFETTI LOCALIZZATI DEGLI HIFU INTERAGISCONO CON QUELLI PIÙ DIFFUSI DELLA RADIOFREQUENZA, DELL'ELETTROPORAZIONE E DELL'ELETTROTHERAPIA PER UN TRATTAMENTO RIGENERATIVO GENERALE DELL'APPARATO FEMMINILE.

VULVAR REJUVENATION

RINGIOVANIMENTO VULVARE - RISTABILISCE IL TROFISMO DEI TESSUTI VULVARI

Con il crono-aging anche i tessuti della zona genitale esterna perdono turgore, elasticità e sensibilità con conseguente discomfort estetico e funzionale.

REVIGEN trova delle precise indicazioni per tali distretti con trattamenti efficaci e non invasivi grazie a due fonti di energie: LA RADIOFREQUENZA E L'ELETTROPORAZIONE.

1 APPLICATORE 2 TERAPIE

RINGIOVANIMENTO VULVARE: MIGLIORA L'ASPETTO ESTETICO E FUNZIONALE DELLA REGIONE VULVARE

- Radiofrequenza bipolare: stimola la biorivitalizzazione delle grandi labbra e della mucosa vulvare con conseguente ritrovata idratazione e miglioramento del trofismo (azione tightening)
- Elettroporazione: veicolazione transdermica di principi attivi ad azione biorigenerante

RADIOFREQUENZA FRAZIONATA

BIO-RIVITALIZZAZIONE DELLE GRANDI LABBRA, MIGLIORAMENTO DEL TROFISMO

Ispirata dall'omonima tecnologia laser, la radiofrequenza frazionata emette una particolare energia che attiva la rigenerazione cellulare agendo sia in superficie che in profondità della mucosa.

RISULTATO : effetto tightening. Migliora il tono delle grandi labbra già dalla prima seduta.

Efficace e senza effetti indesiderati.



Con la terapia Vulvar Rejuvenation l'operatore dispone di trattamenti sicuri e privi di effetti indesiderati, la paziente ritrova il comfort estetico e funzionale della zona vulvare.



PLASMAGEN

LA MICROCHIRURGIA AL PLASMA. TRATTAMENTO AMBULATORIALE DEI CONDILOMI TRAMITE LA TECNOLOGIA FELC




Con Plasmagen si sfrutta la ionizzazione dei gas contenuti nell'aria. I tessuti trattati subiscono un processo di sublimazione passando dallo stato solido a quello gassoso evitando di trasmettere alle zone circostanti ed al sottocutaneo quantità di calore inopportune.

L'energia "plasma" generata dalla ionizzazione sublima selettivamente i tessuti superficiali senza interessare gli strati più profondi.

Il trattamento è estremamente preciso, molto veloce ed i tempi di recupero sono molto bassi.

- PRECISA MODULAZIONE DELLA POTENZA: L'APPLICATORE È COMPOSTO DA UN MANIPOLO ERGONOMICO E LEGGERO CHE PERMETTE DI REGOLARE LINEARMENTE LA POTENZA
- MODULAZIONE DELLE FREQUENZE DI USCITA: LA SCELTA TRA LA MODALITÀ CONTINUA E LA MODALITÀ FRAZIONATA PERMETTE ALL'OPERATORE DI ADATTARE L'ENERGIA AL PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO GARANTENDO IL MASSIMO LIVELLO DI SICUREZZA.

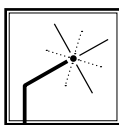

S O F T
T I S S U E
S U R G E R Y



Manipolo ergonomico e leggero con elettrodi di diversa forma per un ampio spettro di zone da trattare

L'ELIMINAZIONE DEI CONDILOMI RICHIEDE SOLTANTO L'USO DI UN GEL ANESTETICO PER IL MASSIMO COMFORT DEI PAZIENTI

I VANTAGGI DEL TRATTAMENTO REVIGEN



INTIMATE REJUVENATION SYSTEM

PER IL TUO STUDIO:

- **PIATTAFORMA MULTIFUNZIONALE: LA PIÙ VASTA GAMMA DI INTERVENTI VULVO-VAGINALI CON UNA SOLA TECNOLOGIA - LA PIÙ COMPLETA AL MONDO**
- **SOLUZIONI SICURE ED EFFICACI PER IL TRATTAMENTO DEI PIÙ DIFFUSI DISTURBI VULVO-VAGINALI**
- **LA TECNOLOGIA NON NECESSITA DI PRODOTTI DI CONSUMO**
- **PROCEDURE SEMPLICI, FACILITÀ DI ESECUZIONE SENZA ALCUN RISCHIO**
- **PROTOCOLLI EFFICACI E SPERIMENTATI**
- **TRAINING CON ESPERTI PROFESSIONISTI DEL SETTORE**





ReviGen

INTIMATE REJUVENATION SYSTEM

PER IL TUO PAZIENTE:

- INTERVENTI NO PAIN, EFFICACI E INDOLORI
- NON ABLATIVO, NON INVASIVO, NON RICHIEDE ANESTESIA
- ATTENUAZIONI DEI SINTOMI GIÀ DELLE PRIME SEDUTE
- TRATTAMENTI AMBULATORIALI
- PROCEDURE DI BREVE DURATA (12 -20 MN)
- NESSUN TEMPO DI RECUPERO, MASSIMO COMFORT
- SOLUZIONI E TERAPIE NON FARMACOLOGICHE, STIMOLANO IL FISIOLÓGICO RECUPERO CELLULARE
- RIVITALIZZANO LA FEMMINILITÀ, RECUPERO DELL'AUTOSTIMA E DEL COMFORT INTIMO

I RISULTATI DI REVIGEN SONO VISIBILI GIÀ DALLA PRIMA SEDUTA E VENGONO CONFERMATI NELL'ARCO DI DUE MESI





ReviGen

INTIMATE REJUVENATION SYSTEM



INTIMATE REJUVENATION SYSTEM

CARATTERISTICHE GENERALI		RADIOFREQUENZA	
ALIMENTAZIONE	100-240 V ac, 50-60 Hz	POTENZA MAX IN USCITA RF	80W @ 50 Ohm
POTENZA MAX ASSORBITA	400 VA	FREQUENZA DI EMISSIONE RF	0,5 MHz, 1 MHz IMPOSTABILE DA SOFTWARE
CLASSE DI SICUREZZA ELETTRICA	II BF	TIPOLOGIA DI EMISSIONE	CAPACITIVA / RESISTIVA
PROTEZIONE ESTERNA	FUSIBILI: : 2 x T 3,15 A L 250V	CARATTERISTICA DI EMISSIONE	MONOPOLARE / BIPOLARE
DISPLAY	10" - COLOUR TOUCH	FUNZIONALITÀ	NORMALE E FRAZIONATA
CONNETTIVITÀ	WIFI-RENEVE-SKY		

ULTRASUONI FOCALIZZATI		ELETTROSTIMOLAZIONE / ELETTROPORAZIONE	
FREQUENZA	4 MHz	TENSIONE MAX USCITA	120V @ 1000 Ohm
DENSITÀ DI ENERGIA	1,5 Joule/mm ² per spot	FREQUENZA DI EMISSIONE	1÷500 Hz
MODALITÀ	FOCALIZZATA/ PULSATA		
DISTANZA FOCAL CARTUCCE	DL3.0 @ 3.0 mm - DL4.5 @ 4.5 mm		

PLASMA		CONDIZIONI DI ESERCIZIO	
TENSIONE MAX USCITA	1000 V	TEMPERATURA AMBIENTE	DA 0°C A +40°C
FREQUENZA DI EMISSIONE	35 KHz	UMIDITÀ AMBIENTE	DAL 30% AL 75% SENZA CONDENSA
		PRESSIONE	da 700 hPa a 1060 hPa

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E TRASPORTO		DIMENSIONI E PESO	
TEMPERATURA AMBIENTE	DA -10°C A +70°C	DIMENSIONI	43 x 40 x H 29 cm
UMIDITÀ AMBIENTE	MAX 95%	PESO	8 KG
PRESSIONE	da 500 hPa a 1060 hPa		

RENEVE
M O N A C O

www.reneve.it

Monte-Carlo Esthetics è certificata
ISO 9001 e ISO 13485

RENEVE è partner ufficiale di:



DISTRIBUTORE PER L'ITALIA: Medical Concept Srl

Viale F. De Blasio Ang. Viale Lindemann, 70132 Bari - Tel. 080 9249001